







synedra Tastenkürzel

	Blättern	B		Zoomen	Z		Hilfe	F1
	Zeiger	A		Bereich zoomen	Q			
	Verschieben	V		Text ein/aus	T			
	Fenstern	F						
	Bild kopieren	Strg + C		Vollbildschirm ein/aus	F11			
	Blättern synchronisieren	Strg + G, B		Erstes Alternatorfeld	Strg + Pos1			
	Synchronisierung ein/aus	Strg + G, A		Voriges Alternatorfeld	Strg + Bild auf			
	Bild zum Drucken auswählen	Leertaste		Nächstes Alternatorfeld	Strg + Bild ab			
	Längenmessung	L		Letztes Alternatorfeld	Strg + Ende			
	Dichtedurchschnitt messen	D		Alternatorband ein/aus	F3			
	Zurückstellen	Rücktaste		Dokumentenbaum leeren	F4			

Tipp: Persönliche Tastaturkürzel können geändert werden unter: Extras → Einstellungen → Tastaturkürzel