

# synedra View Personal

## Releasenotes

© 2024 synedra information technologies  
Alle Informationen im Dokument vorbehaltlich Änderungen  
Ausgabedatum: 2024-07-15  
Produkt: synedra View Personal  
Produktversion: 24.0  
synedra HCM Version 24 "Herakles"

## Inhaltsverzeichnis

---

1. Was ist neu in synedra View Personal 24.0? .....	1
1.1. Neues zum Thema Betrachten und Bearbeiten .....	1
1.2. Weitere Neuerungen .....	2



### Hinweis

Diese Auflistung finden Sie auch in der synedra View Personal [Produktdokumentation](#)<sup>1</sup>. Folgen Sie dort unter „Was ist neu in View Personal 24.0?“ den Links zu weiterführenden Informationen, wenn Sie zu einer neuen Funktion mehr erfahren möchten.


## 1. Was ist neu in synedra View Personal 24.0?

### 1.1. Neues zum Thema Betrachten und Bearbeiten

- Für Werkzeuge, die Sie über die Werkzeugauswahl oder die Werkzeugleiste aufrufen, werden jetzt Tooltips mit einer kurzen Funktionsbeschreibung des jeweiligen Werkzeugs und Hinweisen für die Bedienung angezeigt. Außerdem bieten die Tooltips eine Absprungmöglichkeit in die Hilfe. Ein Tooltip wird eingeblendet, wenn Sie den Cursor auf das Info-Symbol neben dem jeweiligen Werkzeug bewegen (Werkzeugauswahl) oder auf den nach rechts gerichteten Pfeil im Standard-Tooltip des Werkzeugs klicken (Werkzeugleiste).

---

<sup>1</sup> <https://www.synedra.com/intra/documentation.php>

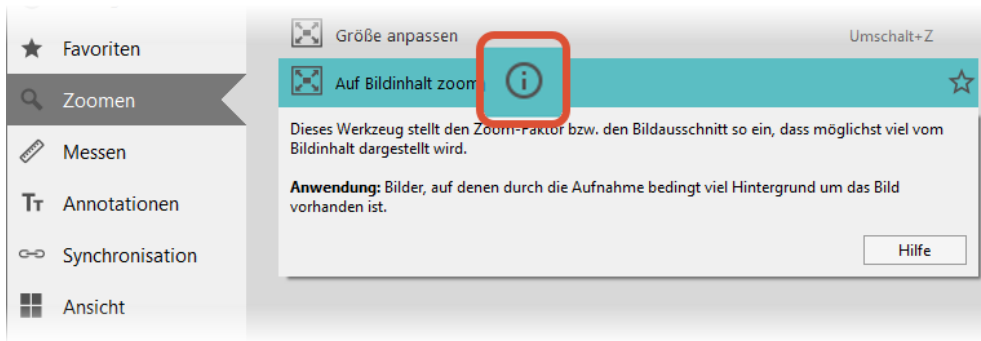

- In der Werkzeugauswahl können Sie nun nach Werkzeugen suchen, indem Sie bei geöffneter Werkzeugauswahl einen Suchbegriff eingeben. Passende Werkzeuge und ihre jeweilige Kategorie werden fett hervorgehoben. Das erste passende Werkzeug wird automatisch vorausgewählt. Sie haben aber auch die Möglichkeit, mit den Pfeiltasten durch das Werkzeugmenü zu navigieren und das gewünschte Werkzeug durch Drücken der **<Enter>**-Taste zu aktivieren.
- Die Werkzeugleiste kann jetzt mit Klick auf den kleinen grauen Pfeil unterhalb der Leiste ein- und ausgeblendet werden. Mit Klick auf den kleinen grauen Pfeil bei gleichzeitig gedrückter **<Strg=Ctrl>**-Taste kann die Werkzeugleiste in allen Viewern ein- und ausgeblendet werden.



- In der Werkzeugleiste Multiframe funktionieren die Tastaturkürzel zum Vor- und Zurückspulen (**<Pfeiltasten rechts/links>**) und zum Starten/Pausieren der Wiedergabe einer Multiframe-Sequenz (**<P>**-Taste) jetzt auch dann, wenn die Werkzeugleiste ausgeblendet ist. Der Fokus muss dabei auf dem jeweiligen Multiframe-Viewer liegen (z. B. mittels Klick auf diesen Multiframe-Viewer).

## 1.2. Weitere Neuerungen

- Der *CD Browser* wurde umbenannt in *Medien-Browser*. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass im Medien-Browser auch Patienten-USB-Medien und nicht nur Patienten-CDs/DVDs geladen und angezeigt werden können.
- Untersuchungen im JPEG 2000 Format können nun schneller und mit weniger Speicherbedarf geladen werden.
- PDFs, die mit ungültigen Daten beginnen, werden nun mit Fehlertoleranz geladen.